

動物血液検査受入条件と注意事項

◆生化学検査

検査対象	:	血清、血漿
検体量	:	別紙、生化学検査必要検体量をご確認ください。
保管条件	:	冷凍
注意点	:	<ul style="list-style-type: none">・ 検体は冷凍便で午前中着指定でお送りください。 ※翌日午前中指定でお送り頂けない場合は検査をお受け出来ないことがあります。・ 容器の破損や検体の漏れが無いようにお送りください。・ 当日の検体数の変更が無いようにお願いします。

◆血球検査

検査対象	:	全血 (EDTA加)
検体量	:	0.10mL
保管条件	:	冷蔵
注意点	:	<ul style="list-style-type: none">・ 血液には必ず抗凝固剤 (EDTA) を添加して下さい。・ 採血は測定日当日にお願いします。・ 検体は冷蔵便で翌日午前中着指定でお送り下さい。 ※翌日午前中指定でお送り頂けない場合は検査をお受け出来ないことがあります。・ 容器の破損や検体の漏れが無いようにお送りください。・ 当日の検体数の変更が無いようにお願いします。